

## MICROVETTE (Микроветы, Германия)

Добавил(а) Administrator


18.10.13 00:00 - Последнее обновление 15.02.18 14:47

---




**Microvette (Микроветы)** простая и удобная система взятия капиллярной крови.

**Microvette 200 EDTA (201288)** по цене **0,18Евро(вкл-я НДС 18%)** шт. СКИДКИ ОТ КОЛИЧ

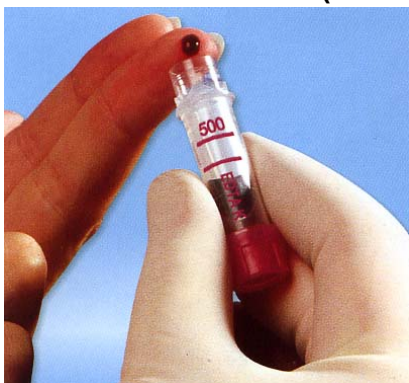

### ВЗЯТИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ MICROVETTE 100/200

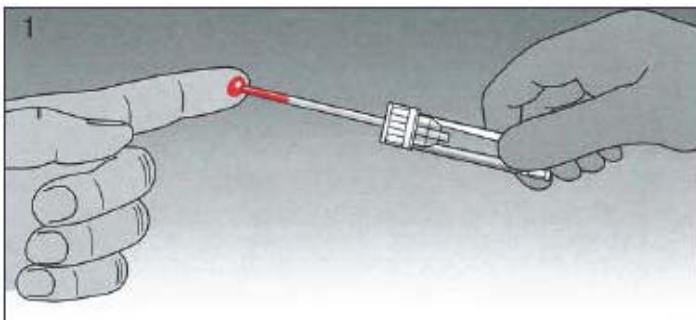

1. После прокола кожи пальца одноразовым стерильным скарификатором, удалить первую ка

## MICROVETTE (Микроветы, Германия)

Добавил(а) Administrator

18.10.13 00:00 - Последнее обновление 15.02.18 14:47


---

Реактив	Назначение
АКТИВАТОР СВЕРТЫВАНИЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ВИРУСОЛОГИЯ БАКТЕРИОЛОГИЯ
АКТИВАТОР СВЕРТЫВАНИЯ +ГЕЛЬ	КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
ЦИТРАТ НАТРИЯ 1:9	ГЕМАТОЛОГИЯ (КОАГУЛОЛОГИЯ)
ЦИТРАТ НАТРИЯ 1:4	ГЕМАТОЛОГИЯ (СОЭ)
ЛИТИЙ ГЕПАРИН	КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
КЗ ЭДТА	ГЕМАТОЛОГИЯ
ФТОРИД НАТРИЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (ГЛЮКОЗА)



## MICROVETTE (Микроветы, Германия)

Добавил(а) Administrator



18.10.13 00:00 - Последнее обновление 15.02.18 14:47

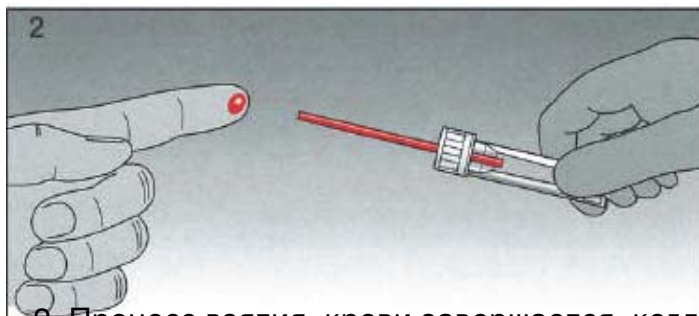

2. Процесс взятия крови завершается, когда капилляр "end-to-end" полностью заполнен кровью.

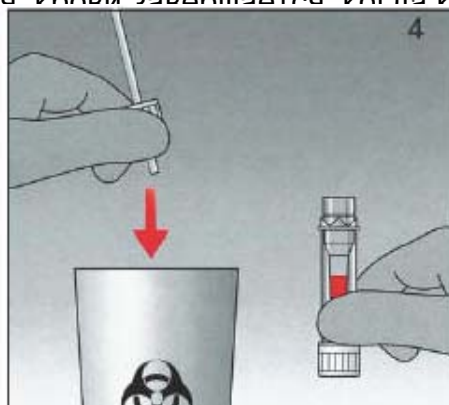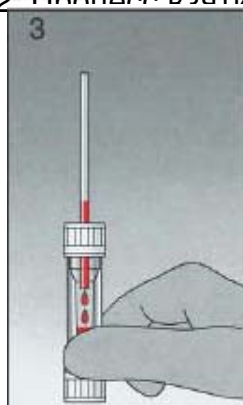

4. Предметы и иглы, которые использовались в пробитке Microvette (микроветну) не подлежат разбору.

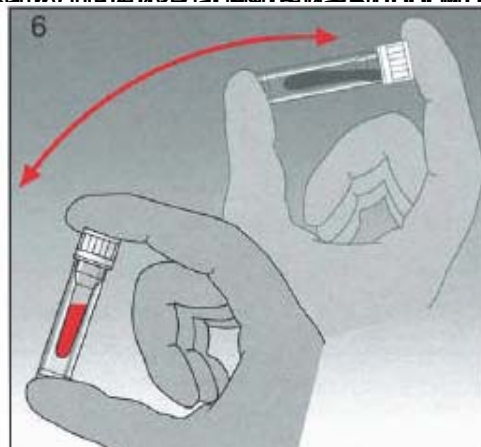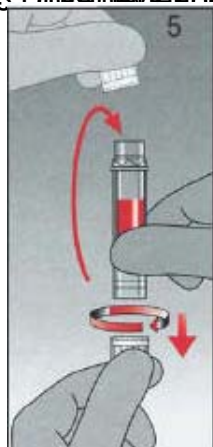

6. При работе с термодиагностическими пробитками Microvette (микроветну) обязательно закрыть

